

訪問診療のX線診断に
映像機器の故障時に **フィルム、現定液が一体化、50秒で現像OK!**

QuicQ EXPRESS

救急エクスプレス

15枚入


より使いやすく！よりシャープな画像に！

フィルムの袋を一回り小さく、開けやすく改良いたしました！



ご愛顧いただいている「救急エクスプレス」がリニューアルいたしました。

デジタルX線では撮影しにくい部位でも、一回りコンパクトになった救急エクスプレスで撮影が可能です。
またフィルムの取り出し部分も改良され、一段と使いやすくなりました。

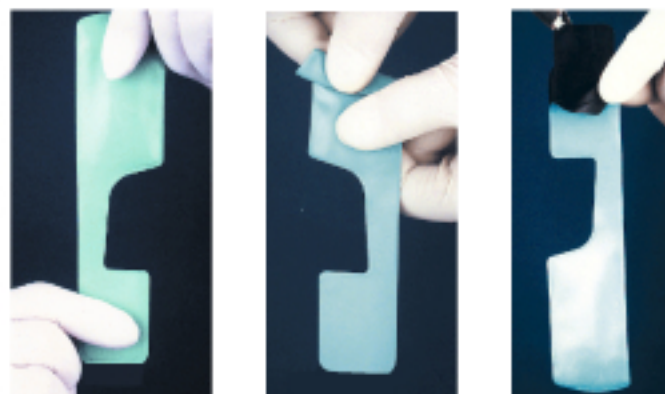

- ① 照射後、液部を上フィルム部を下に持ち、液部上部から丸めていきます。液部の膜が破れフィルム部分に流れ下っていきます。
- ② 瞬時に指で挟みながら、マッサージを50秒間続けます。
- ③ フィルム部を上、液部分を下を持ち替えて、フィルム部分内部の液を元の液部に戻します。
- ④ フィルム部分を左右に開けフィルムを取り出し、水洗いして下さい。

DENTALFILM

デンタルフィルム社 イタリア製
医療機器届出番号：2783X00094001001